

## Hinweise zur Anwendung WILBERT SuperSafe

Hinweis: Den Spenderreimer vor der Befüllung von außen desinfizieren!



Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen. Das Bruchsiegel entfernen.



Öffnen Sie den Deckel des Einwegspenders.



Gebrauchsfertige Lösung spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliesrolle geben.



Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen. Verwerfen Sie das erste Tuch.



Verschließen Sie den Deckel und die Entnahmeöffnung sorgfältig. Das System ist nach 30 Minuten einsatzbereit.



Füllen Sie das vorgesehene Feld auf dem Spender vollständig aus. Standzeit: Maximal 31 Tage.



Nach Ablauf der Standzeit oder vollständigem Verbrauch den Einwegspender verwerfen.

**Empfehlung für Desinfektionsmittelmenge:**

WILBERT SuperSafe: 2,5 - 3,0 Liter

