

## Hinweise zur Anwendung und Wiederaufbereitung WILBERT Super

Hinweis: Auch vor der Erstbefüllung den Spendereimer desinfizieren!



Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen.




Spendereimer und Deckel unter fließendem, heißen Wasser ausspülen und trocknen.



Spendereimer und Deckel mit alkoholischem Flächendesinfektionsmittel gründlich wischdesinfizieren und trocknen lassen.



Rolle aus der Umverpackung nehmen und in den trockenen Spender einsetzen.

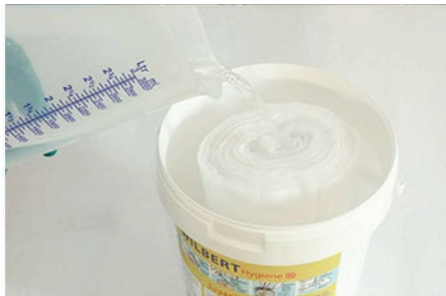

Gebrauchsfertige Lösung spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen.



Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen.



Deckel und Entnahmeöffnung fest verschließen. Das System ist nach 30 Minuten einsatzbereit.



Beigefügtes Etikett ausfüllen. Standzeit: Maximal 28 Tage.



Etikett aufkleben.

**Empfehlung für Desinfektionsmittelmenge:**

WILBERT Super 40:	1,0 - 1,5 Liter
WILBERT Super 90:	2,0 - 2,5 Liter
WILBERT Super 150:	2,5 - 3,5 Liter

